

45871-1



# Systeme®

BENETZUNGSTROPFEN  
FÜR DIE AUGEN

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch, und bewahren Sie sie auf, um sie später noch einmal nachlesen zu können.

## BESCHREIBUNG:

Bei **SYSTANE® Benetzungstropfen für die Augen** handelt es sich um eine sterile Lösung mit folgenden Inhaltsstoffen: Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Borsäure, Calciumchlorid, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Zinkchlorid und POLYQUAD® (Polidroniumchlorid) 0,001 % als Konservierungsmittel.

## ANWENDUNGSGEBIETE:

SYSTANE® sind Benetzungstropfen zur Therapie Trockener Augen.

SYSTANE® lindert die Symptome Trockener Augen wie Brennen und Irritationen.

## GEGENANZEIGEN (Gründe gegen eine Anwendung):

Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von **SYSTANE® Benetzungstropfen für die Augen** sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

## ANWENDUNGSHINWEISE:

**SYSTANE® Benetzungstropfen für die Augen** können täglich nach Bedarf angewendet werden. Geben Sie ein bis zwei Tropfen in das betroffene Auge und blinzeln Sie. Bei der Behandlung von trockenen Augen in Verbindung mit dem Tragen von Kontaktlinsen, geben Sie die Tropfen vor dem Einsetzen der Kontaktlinsen und nach dem Entfernen der Kontaktlinsen ins Auge.

## WARNHINWEISE:

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers und die Packungshinweise zur korrekten Anwendung des Produktes beachten. Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, suchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

## VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie jedes Berühren der Tropferspitze der Flasche oder deren Kontakt mit Gegenständen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Nach Gebrauch wieder verschließen.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Flasche bei Nichtgebrauch stets fest verschlossen halten.
- Vor dem auf Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden.
- Restmengen der Augentropfen sechs Monate nach Anbruch der Flasche verwerfen.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

## PACKUNGSGRÖSSEN:

**SYSTANE® Benetzungstropfen für die Augen**, sind als dampfsterilisierte und sterilfiltrierte Lösung in Plastikflaschen zu 10 ml und 3 x 10 ml erhältlich.

**STERILE**

## VERTRIEB für Deutschland:

Alcon Pharma GmbH  
Blankreutestraße 1  
79108 Freiburg

## VERTRIEB für Österreich:

Alcon Ophthalmika GmbH  
Maria Hilferstraße 120  
1070 Wien

## HERSTELLER:

Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099

## EU-BEVOLLMÄCHTIGTER:

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.  
Boundary Way  
Hemel Hempstead  
Hertfordshire  
HP2 7UD United Kingdom

US-Patentnr. 6403609, 6583124, 8838449 und Europäische Patent Nr. 0999825

© 2003, 2010 Alcon, Inc.

Haben Sie weitere Fragen?  
Informieren Sie sich unter  
[www.Augen-Forum.de](http://www.Augen-Forum.de)