

# Systeme\*

BENETZUNGSTROPFEN FÜR  
DIE AUGEN

## HYDRATION UD



### **Beschreibung:**

Bei SYSTEME\* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen handelt es sich um eine sterile Lösung mit folgenden Inhaltsstoffen: Natriumhyaluronat, Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Borsäure, Natriumborat, Kaliumchlorid und Natriumchlorid.

### **Anwendungsgebiete**

SYSTEME\* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen dienen der Therapie Trockener Augen. Sie lindern vorübergehend die Symptome Trockener Augen wie Brennen und Irritationen.

SYSTEME\* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen können zur Befeuchtung und Nachbenetzung von Tageslinsen, Linsen zum verlängerten Tragen und Austauschlinsen verwendet werden, sowohl bei Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen als auch weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen.

### **Gegenanzeigen (Gründe gegen eine Anwendung):**

Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von SYSTEME\* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.

### **Warnhinweise:**





Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers und die Packungshinweise zur korrekten Anwendung des Produktes beachten.

Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder

Augenrötung kommt, benutzen Sie SYSTEME\* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen nicht mehr und suchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

SYSTEME\* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen ist kein Reinigungs- oder Desinfektionsmittel für Kontaktlinsen. Bewahren Sie Ihre Linsen nicht in SYSTEME\* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen auf und desinfizieren Sie sie nicht damit.

### **Vorsichtsmaßnahmen:**

- Vermeiden Sie jede Berührung der Spitze des Einzeldosisbehältnisses oder deren Kontakt mit anderen Oberflächen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Vor dem auf Packung und Behältnis angegebenen Verfalldatum verwenden. 
- Nicht verwenden, wenn die Packung oder das Einzeldosisbehältnis geöffnet oder beschädigt wurde. 
- Einzeldosisbehältnis nach einmaliger Anwendung verwerfen. Restmengen der Augentropfen nicht wiederverwenden. 
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
- Nicht über 30°C lagern. 

### **Anwendungshinweise:**

Öffnen Sie ein Einzeldosisbehältnis und geben Sie nach Bedarf ein bis zwei Tropfen in das/die Auge(n) und blinzeln Sie. Einzeldosisbehältnis nach Anwendung verwerfen.

SYSTANE\* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen können täglich nach Bedarf angewendet werden, um Symptome des Trockenen Auges zu lindern.

Wenn während des Kontaktlinsentragens leichtere Reizung, Unbehagen oder verschwommenes Sehen auftreten, geben Sie ein bis zwei Tropfen auf die Linsen und blinzeln Sie zwei- bis dreimal.

**Packungsgrößen:**

SYSTANE\* HYDRATION UD Benetzungstropfen für die Augen sind in Einzeldosisbehältnissen aus Kunststoff in Packungen zu 30 x 0,7 ml erhältlich.

**STERILE | A**

**Alcon**<sup>®</sup>  
a Novartis company



Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.  
Frimley Business Park  
Frimley, Camberley  
Surrey, GU16 7SR  
Vereinigtes Königreich



Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, TX, USA 76134-2099  
a Novartis company

© 2015 Novartis

\*ein Warenzeichen von Novartis

**Vertrieb für Deutschland**

Alcon Pharma GmbH  
Blankreutestraße 1  
79108 Freiburg

**Vertrieb für Österreich**

Alcon Ophthalmika GmbH  
Stella-Klein-Löw-Weg 17  
1020 Wien